



粉絲專業




公司官網



Line

無線腋溫量測器 型號ST3B 簡易操作說明

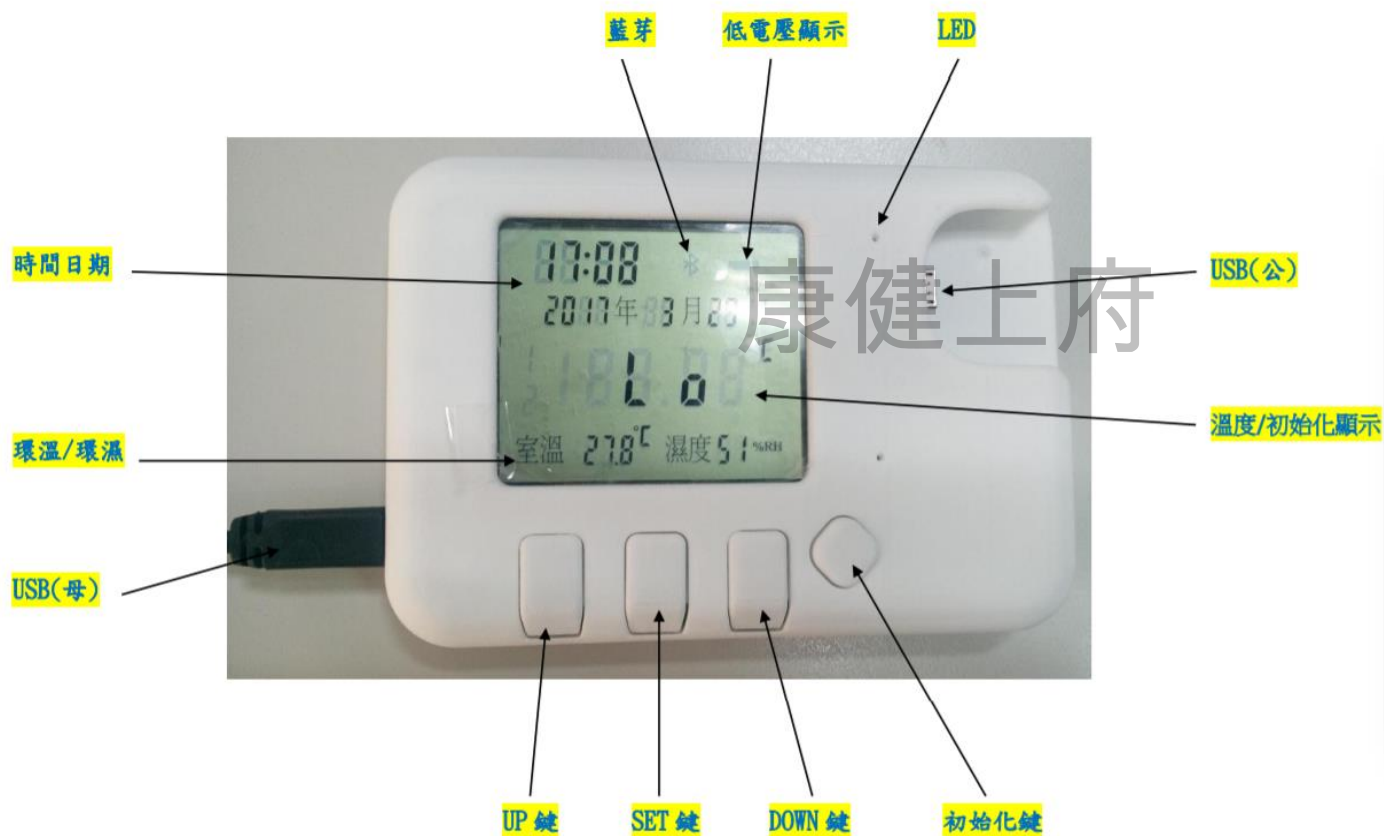

貼片測量示意圖



粉絲專業



公司官網



Line

- 插入USB電源, 此時LCD全顯示→36.50°C→日期及時間/環溫濕/L0°C
- 插入子機, L0°C→及時溫度顯示
- 打開手機APP進行連線, 連線成功會出現藍芽符號(藍芽電源啟動時即開啟了, 沒有開關)
- 用APP校正時間
- 開始進行量測 :
 1. 按住”初始化鍵” > 5秒, 主機綠燈開始閃爍, 完成時LCD顯示” PASS”字樣(綠燈直亮), 完成初始化動作
 2. 此時子機開始閃爍綠燈, 表示可以拔出主機,
 3. 子機拔出主機後, 主機LCD “PASS”→” L0°C”
 4. 子機綠燈持續閃爍, 放入量測部位, 開始進行量測記錄.
 1. 量測記錄範圍 : 10.0°C~43.0°C (89.6°F~109.4°F)。
 2. 從主機取下後, 當溫度上升每秒上升0.5°C或 >28°C就開始記錄, 前10分鐘每1秒一筆, 後續每10秒紀錄一次, 直至4860筆或溫度值 < 32.0°C達1小時, 即自動關機。
 3. 主機儲存容量 : 可存入9組(每組4860筆)
 5. 將測量完成之子機插回主機, 此時LCD溫度數字位置呈現外框跑馬燈顯示, 開始下載資料
 6. 下載完成顯示最後一筆溫度, 完成下載動作
 7. 從主機看溫度記錄 :
 1. 按SET鍵, 顯示” n2 d1”, n=N0, 2=記憶組別, d=此組位置有資料(如果n”及此組無資料), 1=第一個子機(目前只使用一個子機)
 1. 連續按SET鍵可以循環 1~9組位置, 5秒沒按自動退出
 2. 選擇組別後, 按UP鍵或 DOWN鍵可上下翻看記憶溫度值
- 確認藍芽有連線(觀看LCD上藍芽符號有出現, 表示已連線, 如未出現請重新連接)
- 按下APP上”讀取紀錄資訊”, 將資料傳送至手機上
- 後續動作就全部在APP上操作
- 完成

註 1 : “低電壓顯示” 是針對內部時間用的電池, 沒電池時每次開機需用APP重設時間, 電池約可使用>2年

註 2 : 手機下載資料中, 主機按鍵暫停功能

註 3 : 子機閃紅燈時請插回主機充電, 待紅燈熄滅後再使用



粉絲專業




公司官網



Line

無線腋溫量測器 型號ST3D 簡易操作說明

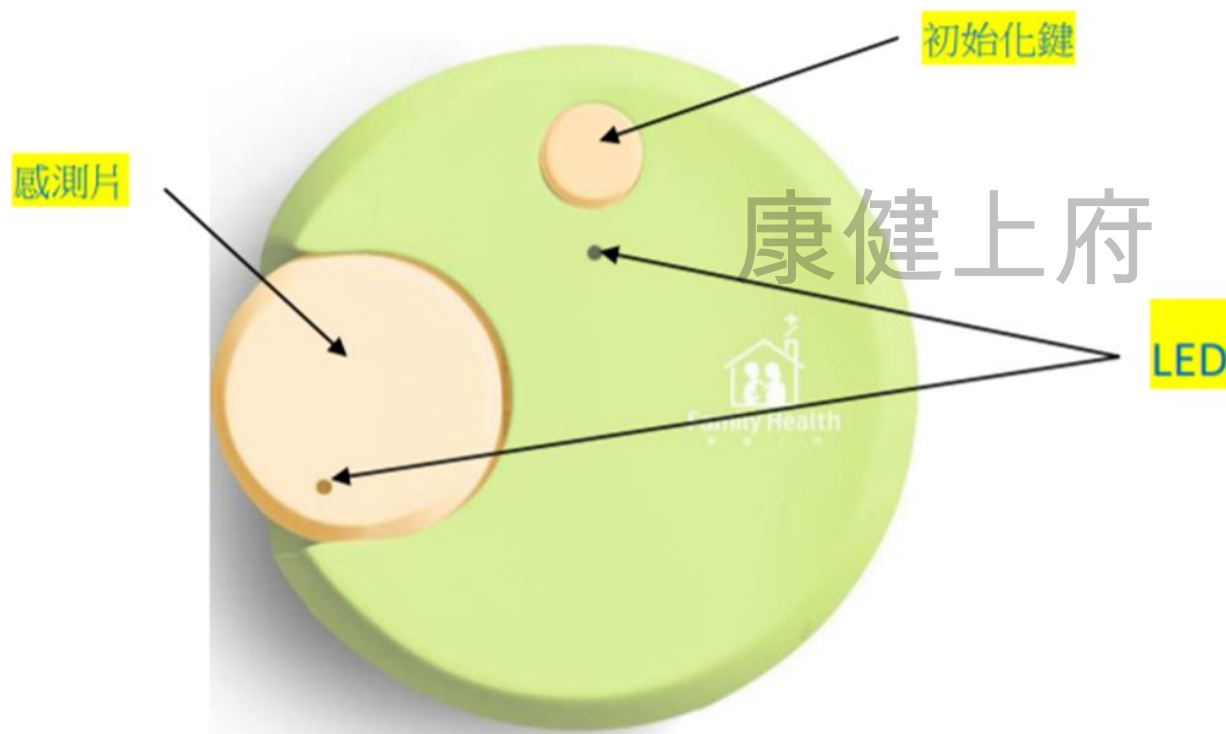

貼片測量示意圖



粉絲專業



公司官網



Line

- 插入主機USB電源。
- 將感測片插入主機，此時主機綠燈閃爍，表示已和感測片連線(如果感測片有閃紅燈，表示感測片電池電壓太低，在充電中)。
- 打開手機APP進行連線。
- 用APP校正時間(一定要做此動作)。
- 開始進行量測：
 1. 按住”初始化鍵” >5秒，主機綠燈開始閃爍，直到綠燈直亮，完成初始化動作，此時感測片也開始閃爍，表示初始化完成。
 1. 將感測片拔出主機。
 2. 感測片綠燈持續閃爍，放入量測部位，開始進行量測記錄。
 1. 量測記錄範圍：10.0°C~43.0°C(89.6°F~109.4°F)。
 2. 從主機取下後，當溫度上升每秒上升0.5°C或>28°C就開始記錄，前10分鐘每1秒一筆，後續每10秒紀錄一次，直至4860筆或溫度值< 32.0°C達1小時，即自動關機。
 1. 主機儲存容量：可存入9組(每組4860筆)。
 3. 將測量完成之感測片插回主機，此時 LED會快速閃爍示，開始下載資料。
 4. 下載完成後，LED會恢復正常連線閃爍，即完成下載動作。
- 確認藍芽有連線。
- 按下APP上”讀取紀錄資訊”，將資料傳送至手機上。
- 後續動作就全部在APP上操作。
- 完成
 - 註 1：主機設定完時間後，如果USB插拔過後時間變更，表示要換內部電池。
 - 註 2：手機下載資料中，主機按鍵暫停功能。
 - 註 3：感測片閃紅燈時請插回主機充電，待紅燈熄滅後再使用。
 - 註 4：建議使用前將子機充電20分鐘後開始使用。



粉絲專業



公司官網



Line

注意事項：

1. 注意本機雖有周全的設計，但仍需預防小孩子以起子或他物翹開，吞食電池。
2. 不可分解機體。
3. 如消毒感溫部，請用清水或稀釋的酒精擦拭。
4. 使用後請將污漬或汗水擦拭乾淨，以保持清潔。
5. 使用或清潔時，避免污漬或清潔液從顯示部位、電池蓋或背蓋滲入。
6. 本體如有髒污時，請以柔軟的布擦拭，如擦拭不掉時可用中性清潔劑，但絕不可用香蕉水或甲苯類溶劑，以防外部變質或內部故障。
7. 不可放置在高溫及日光直射或髒濕地方。
8. 請放至於小孩拿不到的地方。
9. 病患是預期的使用者。
10. 使用時不要維護設備。
11. 應用部位是感測頭。
12. 如長期不使用時，請每2個月取出插上USB充電30分鐘。

簡易故障排除：

1. 開機後量測中途LED顯示不正常：請待自動關機後重新開機。若仍有此情況發生，請洽經銷商送回原廠處理。
2. 注意主機電池拆卸過，時間需重新設定。

警告：

- 本機體內含精密零件組，請勿放置在高溫及日光直射或髒濕地方。
- 請勿放置強烈電磁波附近，或操作本產品時使用行動電話或無線頻率產品。
- 請嚴防重摔或撞擊，並且注意防塵。
- 請勿使用熱水或100%酒精消毒清潔本體及感測片。
- 請放置於孩童拿不到的地方，避免造成故障及危險。
- 請勿使用任何工具試圖拆解本機。
- 請勿自行維修或改造。

康健上府